

BRUGERVEJLEDNING
Remo-wax® Olie ørespray

VIRKNING OG ANVENDELSE

Remo-wax Olie ørespray er en plejende olie, til anvendelse i den ydre øregang, der forebygger ørevokspropper i øret. Remo-wax Olie ørespray fugter også huden i øregangen og mindsker dermed kløe og irritation forårsaget af tør hud.

BRUG IKKE REMO-WAX® OLIE HVIS

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, revnet eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax Olie.

SÆRLIGE PATIENTGRUPPER

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dosere Remo-wax Olie i din øregang.

Børn: Remo-wax Olie bør ikke anvendes til børn under 1 år uden kontakt med lægen.

Brugere med høreapparat: Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at olien er optaget af huden, dvs. når øret igen føles tørt.

MULIGE BIVIRKNINGER

Remo-wax Olie ørespray har ingen kendte bivirkninger. Brug af ørespray som Remo-wax Olie, kan føre til følelsen af ubehag, såsom smerte, i øret.

Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om at Remo-wax Olie har medført bivirkninger hos dig.

For at indberette en alvorlig hændelse skal du kontakte fabrikanten og den lægemiddelfaglige myndighed (Lægemiddelstyrelsen, +45 4488 9595) i det land, hvor du har bopæl. Dette er vigtigt for den løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for produktet.

DOSERINGSVEJLEDNING

Forebyggelse af ophobning af ørevoks:

Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i øregangen én gang om ugen. Regelmæssig brug af Remo-wax Olie ørespray forhindrer ophobning af ørevoks. Remo-wax Olie kan anvendes så ofte det behøves.

Behandling af tørhed og kløe i

øregangen: Spray 1-2 doser af Remo-wax Olie ørespray i øregangen én gang om ugen eller ved behov. Remo-wax Olie kan anvendes så ofte det behøves.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ØRESPRAYEN

- Opvarm indholdet i sprayflasken med Remo-wax Olie til håndtemperatur (cirka 37°C) ved at holde sprayflasken i hånden et par minutter.
- Før sprayen anvendes første gang,** sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde indtil der kommer en jævn stråle. Vend altid sprayen væk fra dig selv. Hvis øresprayen ikke har været brugt i et stykke tid, skal du teste, at der kommer en jævn stråle ved at spraye 1-2 gange.
- Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med sprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 1-2 doser Remo-wax Olie ørespray i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned med en drejende bevægelse nogle gange.
- Overskydende olie i øregangen tørres af med f.eks. et papirlommetørklæde. Brug ikke vatpinde! Den olie, der er blevet sprøjtet ind i øregangen skal ikke skylles væk.
- Løsn sprayens mundstykke efter anvendelse, rengør det med mild sæbe, skyl det omhyggeligt med vand, tør det og sæt det på flasken igen. **Anvend aldrig sprayflasken uden at sprayens mundstykke er sat på flasken!**

ANDEN INFORMATION

Remo-wax Olie ørespray er kun til personlig brug.

Remo-wax Olie er kun til anvendelse i øregangen.

Hvis du får Remo-wax Olie ordineret af lægen skal du følge de anvisninger, du får af lægen.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax Olie, så kontakt lægen, sygeplejerske eller apoteket.

INDHOLDSTOFFER

Triglycerider, middelkædelængde (0,40 mg/ml), isopropylpalmitat (0,35 mg/ml), hydrogeneret polydecen (0,25 mg/ml)

OPBEVARING

Må ikke opbevares ved temperatur over 25°C. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Flasken skal anvendes indenfor 6 måneder efter åbning.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide produktrester i afløbet eller skraldespanden.

Rester bør afleveres på apoteket til bortskaffelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.

PAKNINGSSTØRRELSER

Remo-wax Olie 15 ml

FREMSTILLER

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

DISTRIBUTØR I DANMARK

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

DK-2300 København S

Danmark

Tel. +45 8614 0000

www.orionpharma.dk

DENNE BRUGERVEJLEDNING BLEV SENEST REVIDERET 06/2024

	0537	
		Medicinsk udstyr
		Se brugsanvisningen
		Forsigtig
		Fabrikant
		Fremstillingsland
		Distributør
		Oversættelse
	25°C	Maks. temperatur
		Anvendes inden/ udløbsdato
		Batchkode
		Unik udstyrsidentifikation

BRUGERVEJLEDNING
Remo-wax® øredråber

Virkning og anvendelse
Remo-wax øredråber løsner ørevoks og ørevokspropper.

- Brug ikke Remo-wax øredråber hvis**
- øret er betændt eller gør ondt
 - der flyder sekret ud af øret
 - trommehinden er beskadiget, perforeret eller punkteret (f.eks. dræn i øret)
 - du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax øredråber.

Særlige patientgrupper
Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dryppe Remo-wax øredråber i din øregang og skylle øret som beskrevet i denne brugervejledning.

Børn
Remo-wax øredråber bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning. Følg nøje den vejledning du har fået. En øreskylning hos børn skal helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Brugere med høreapparat
Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at øret er blevet skyllet og vandet er løbet ud af øret.

Mulige bivirkninger
I nogle sjældne tilfælde kan der forekomme lokale allergiske reaktioner i forbindelse med anvendelse af Remo-wax øredråber. Ubehagelig fornemmelse i øregangen, hudirritationer og forbigående svimmelhed kan forekomme. Tinnitus kan være et symptom på ørevokspropper, og forbigående tinnitus kan forekomme efter rensning af øret.

Hvis øresprøjten skubbes for dybt ind i øregangen, kan trommehinden beskadiges.

Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om, at Remo-wax øredråber har medført bivirkninger hos dig.

For at indberette en alvorlig hændelse skal du kontakte fabrikanten og Lægemiddelstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen, +45 4488 9595) i den medlemsstat, hvor du har bopæl. Dette er vigtigt for den løbende overvågning af forholdet mellem fordele og risici for produktet.

Sådan skal du bruge Remo-wax øredråberne og øresprøjten

Løsne ørevokspropper med øredråber

- Opvarm indholdet i flasken med Remo-wax øredråber til håndtemperatur (cirka 37°C) ved at holde flasken i hånden et par minutter.
- Hold hovedet skråt mod skulderen eller læg dig ned med hovedet drejet til siden og dryp 10-20 dråber Remo-wax øredråber ind i øret. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange med drejende bevægelse. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat fugtet med nogle få Remo-wax øredråber.
- Lad Remo-wax øredråber virke i 20-60 minutter. Hvis nødvendigt kan væsken blive i øret natten over.

Efter anvendelse af Remo-wax øredråber skal øregangen skylles. Du kan bruge Remo-wax øresprøjten til skylning eller kontakt en læge eller sygeplejerske for en øreskylning. Hos børn skal en øreskylning helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Øreskylning med øresprøjten

- Før anvendelse skal øresprøjten skylles igennem hver gang.
- Sug håndvarmt/lunkent vand op i øresprøjten.
- Før forsigtigt spidsen af øresprøjten et par millimeter ind i øregangen og skyl øret ved at trykke let og forsigtigt på øresprøjten.

Stik ikke spidsen af øresprøjten dybt ind i øregangen!

- Gentag skylningen nogle gange indtil vandet, der løber ud af øret, er helt klart.
- Skyl øresprøjten igennem og tøm den ved at trykke på den, indtil den er tom, efter hver behandling. Lad vandet dryppe ud med spidsen nedad.

Hvis én behandling ikke løsner ørevoksproppen, kan du, hvis nødvendigt, gentage inddrypningen af øredråber og øreskylning i tre på hinanden følgende dage.

OBS! Skyl øregangen efter hver behandling.

Hvis du får foretaget øreskylning hos lægen eller en sygeplejerske, så følg de anvisninger du får

Øreskylning må aldrig medføre smerte. Hvis du oplever smerte, så stop øreskylningen og kontakt din læge.

 Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene med rigeligt vand og kontakt læge, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax øredråber, så kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Indholdstoffer
Allantoin (3 mg/ml), etoxileret lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flydende sorbitol, fructosesirup, polyoxetylen stearylether, polyoxyetylen oleylether, lanolinolie, isopropylmyristat, risklidolie, phenethanol, cetylalkohol, butylhydrocyltoluen, sorbinsyre, benzethoniumchlorid og vand.

Opbevaring
Må ikke opbevares ved temperatur over 25°C. Opbevar Remo-wax øredråber og øresprøjte utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen. Af hensyn til miljøet må du ikke smide produktrester i afløbet eller skraldespanden. Rester bør afleveres på apoteket til bortskaffelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.

Pakningsstørrelser
Remo-wax øredråber 10 ml
Behandlingspakke:
Remo-wax øredråber 10 ml med øresprøjte

Fremstiller
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Distributør i Danmark
Orion Pharma A/S
Ørestads Boulevard 73
DK-2300 København S
Danmark
Tel. +45 8614 0000
www.orionpharma.dk

Denne brugervejledning blev senest revideret 04/2025

	0537
	Medicinsk udstyr
	Se brugervejledningen
	Forsigtig
	Fabrikant
	Fremstillingsland
	Distributør
	Oversættelse
	25°C Maks. temperatur
	Anvendes inden/ udløbsdato
	Batchkode
	Unik udstyrsidentifikation

BRUGERVEJLEDNING
Remo-wax®
ørespray

Virkning og anvendelse

Remo-wax ørespray løsner ørevoks og ørevokspropper.

Brug ikke Remo-wax ørespray hvis

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, perforeret eller punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax ørespray.

Særlige patientgrupper

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dosere Remo-wax ørespray i din øregang og skylle øret som beskrevet i denne brugervejledning.

Børn

Remo-wax ørespray bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning. Følg nøje den vejledning du har fået. En øreskylning hos børn skal helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Brugere med høreapparat

Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at øret er blevet skyllet og vandet er løbet ud af øret.

Mulige bivirkninger

I nogle sjældne tilfælde kan der forekomme lokale allergiske reaktioner i forbindelse med anvendelse af Remo-wax ørespray. Ubehagelig fornemmelse i øregangen, hudirritationer og forbigående svimmelhed kan forekomme. Tinnitus kan være et symptom på ørevokspropper, og forbigående tinnitus kan forekomme efter rensning af øret. Hvis øresprøjten skubbes for dybt ind i øregangen, kan trommehinden beskadiges. Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om, at Remo-wax ørespray har medført bivirkninger hos dig. For at indberette en alvorlig hændelse skal du kontakte fabrikanten og Lægemiddelstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen, +45 4488 9595) i den medlemsstat, hvor du har bopæl. Dette er vigtigt for den løbende overvågning af forholdet mellem fordele og risici for produktet.

Sådan skal du bruge Remo-wax øresprayen og øresprøjten

Løsne ørevokspropper med ørespray

- Opvarm indholdet i flasken med Remo-wax ørespray til håndtemperatur (cirka 37°C) ved at holde flasken i hånden et par minutter.
- Før øresprayen anvendes **første gang**, sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde indtil der kommer en jævn stråle. Vend altid øresprayen væk fra dig selv. Hvis øresprayen ikke har været brugt i et stykke tid, skal du teste, at der kommer en jævn stråle ved at spraye 1-2 gange.
- Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med øresprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 2-3 doser Remo-wax ørespray i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange med en drejende bevægelse. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat fugtet med Remo-wax ørespray.
- Lad Remo-wax ørespray virke i 20-60 minutter. Hvis nødvendigt kan væsken blive i øret natten over.
- Løsn øresprayens mundstykke efter anvendelse, rengør den med mild sæbe, skyl den omhyggeligt, tør den og sæt den tilbage på flasken igen. **Anvend aldrig sprayflasken uden at sprayens mundstykke er fastgjort på flasken!**

Efter anvendelse af Remo-wax ørespray skal øregangen skylles. Du kan bruge Remo-wax øresprøjten til skylning eller kontakt en læge eller sygeplejerske for en øreskylning. Hos børn skal en øreskylning helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

Øreskylning med øresprøjten

- Før anvendelsen skal øresprøjten skylles igennem hver gang.
- Sug håndvarmt/lunkent vand op i øresprøjten.
- Før forsigtigt spidsen af øresprøjten et par millimeter ind i øregangen og skyl øret ved at trykke let og forsigtigt på øresprøjten.

Stik ikke spidsen af øresprøjten dybt ind i øregangen!

- Gentag skylningen nogle gange indtil vandet, der løber ud af øret, er helt klart.
- Skyl øresprøjten igennem og tøm den ved at trykke på den, indtil den er helt tom, efter hver behandling. Lad vandet dryppe ud med spidsen nedad.

Anden information

Remo-wax ørespray er kun til personlig brug. Hvis én behandling ikke løsner ørevoksproppen, kan du gentage, om nødvendigt, behandlingen med øresprayen og øreskylning i tre på hinanden følgende dage. **OBS!** Skyl øregangen efter hver behandling. Hvis du får foretaget øreskylning hos lægen eller en sygeplejerske, så følg de anvisninger du får.

Øreskylning må aldrig medføre smerte. Hvis du oplever smerte, så stop øreskylningen og kontakt din læge.



Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene med rigeligt vand og kontakt læge, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax ørespray, så kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Indholdstoffer

Allantoin (3 mg/ml), etoxylet lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flydende sorbitol, fructosesirup, polyoxetylen stearylether, polyoxyethylen oleylether, lanolinolie, isopropylmyristat, risklidolie, phenethanol, cetylakohol, butylhydrocytoluen, sorbinsyre, benzethoniumchlorid og vand. Øresprøjte: Polyvinylklorid (PVC).

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperatur over 25°C. Opbevar Remo-wax ørespray og øresprøjte utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide produktrester i afløbet eller skraldespanden. Rester bør afleveres på apoteket til bortskaffelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.

Pakningsstørrelser

Remo-wax ørespray 10 ml
Behandlingspakke: Remo-wax ørespray 10 ml med øresprøjte

Fremstiller

Remo-wax ørespray:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo, Finland



Øresprøjte:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer, Tyskland



Behandlingspakkeproducent

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Distributør i Danmark

Orion Pharma A/S
Ørestads Boulevard 73
DK-2300 København S
Danmark
Tel. +45 8614 0000
www.orionpharma.dk

Denne brugervejledning blev senest revideret 04/2025



Medicinsk udstyr



Se brugervejledningen



Forsigtig



Fabrikant



Fremstillingsland



Distributør



Oversættelse



Maks. temperatur



Anvendes inden/udløbsdato



Batchkode



Unik udstyrsidentifikation